



**Plavte,
sprchujte se,
koupejte se!**
Velikosti pro děti
i dospělé

Vodotěsný

100%

Do vody se zlomenou rukou či nohou?

Drypro™ voděodolný návlek
(nejen!) na sádku.



Bezpečné a snadné použití
Protiskuzový povrch zabraňující uklouznutí
Kvalitní a odolný materiál



Ochranné návleky do vody DryPro™ od firmy Dry Corp, LLC již zachránily nespočet letních dovolených a zvýšily kvalitu života miliónům zákazníků. Díky svému unikátnímu systému perfektně ochrání (nejen) před vodou končetinu v sádře, ortéze, s fixátérem, ránou, stehy či s jiným poraněním.

Návleky DryPro™ se systémem odsávání vzduchu umožňují vytvořit zcela neprodyšné vakuum, takže se s pomůckou můžete bez obav i potápět, surfovat či věnovat divokým vodním sportům.

DryPro™ je vyroben z odolného materiálu, který je vhodný do sladké i slané vody. Na končetině drží pevně a nesmeká se. Návleky na nohy mají chodidlo potažené protisklizovou vrstvou, takže se u bazénu či v koupelně můžete pohybovat bez obav z uklouznutí. Díky široké velikostní škále návleky dobře padnou dětem i dospělým.

Jak určit velikost?

Aby ochranný návlek plnil svou funkci, je třeba vybrat správnou velikost. Ta se volí dle obvodu končetiny a délky části končetiny, kterou je třeba ochránit. Obvod končetiny měřte zhruba 7–10 cm nad koncem sádry. Neměřte obvod přes klouby. Pokud sádra dosahuje těsně k lokti, pak obvod paže měřte přes biceps. Pokud sádra končí těsně pod kolenem, změřte obvod v polovině stehna.

Měření provádějte na holém těle, nikoli přes oblečení nebo sádru. Délku návleku na ruku měřte od konce prostředníčku k hornímu okraji sádry. U dolní končetiny změřte vzdálenost od paty (podložky) k okraji sádry. K naměřené vzdálenosti přičtete 7–10 cm.

Vyberte z velikostní tabulky návlek dle naměřených hodnot. Neobávejte se, že bude příliš velký nebo dlouhý. Po vysátí vzduchu se guma těsně přimkne k tělu a neodstává.

Plavte, sprchujte se, koupejte se!

**1**

Jak návlek použít?

1. Nasazení návleku:

Přetáhněte návlek přes sádku.

**2**

2. Vypumpování vzduchu:

Nasadte balónek na ventil a pumpováním vysajte z návleku vzduch.

Návlek je připraven k použití.

**3**

3. Sejmутí návleku:

Pod okraj návleku vsuňte prsty.

Návlek se napustí vzduchem a můžete jej sejmout.

**4**

4. Hurá do vody:

Užijte si teplou sprchu, relaxační koupel nebo plavání. Vakuový ochranný návlek DryPro™ je zcela vodotěsný a tak přilnavý, že rozhodně nesklouzne.

Vodotěsný 100%

Výjimečně odolný

Návlek DryPro™ je vyroben z kvalitního medicínského latexu a vydrží každodenní používání po mnoho měsíců. Speciální protiskluzová povrchová úprava Non-Skid Grid™ chrání podrážku návleku a zabraňuje uklouznutí.

Snadné použití

Igelitové sáčky a lepicí páska jsou velmi komplikované a navíc nefunkční řešení. Nasadit návlek DryPro™ je otázka několika sekund a jeho vodotěsnost je 100%.

Rychleji fit

S DryPro™ můžete ihned po chirurgickém zákroku zahájit vodoléčbu a urychlit tak svou rekonvalescenci.



nejlepší vodotěsný návlek do vody na světě



Horní končetina

Produkt	Označení	Obvod (cm)	Délka (cm)
Předloktí vel. S	HA-13	20-25	44
Předloktí vel. L	HA-15	25+	50
Celá paže vel. XS	FA-12	15-17	40
Celá paže vel. S	FA-14	17-22	58
Celá paže vel. M	FA-16	22-25	71
Celá paže vel. L	FA-18	25+	80



Dolní končetina

Produkt	Označení	Obvod (cm)	Délka (cm)
Lýtko vel. S	HL-13	25-33	53
Lýtko vel. L	HL-15	33+	60
Celá noha vel. XS	FL-12	19-28	48
Celá noha vel. S	FL-14	35-41	74
Celá noha vel. M	FL-16	41-53	83
Celá noha vel. L	FL-18	53+	94



Jitřní 2283, 252 28 Černošice,
+420 777 210 099, +420 251 642 165, info@gps-ofa.cz
www.koupacinaavleky.cz
www.kupacienavleky.sk